

smiths medical
bringing technology to life



Cleo® 90 Infusions-Set

Kompaktes subkutanes
Infusions-Set



DIE VORTEILE DES CLEO® 90 INFUSIONS-SETS LIEGEN AUF DER HAND



Sicherheit durch umschlossene Nadel

Die umschlossene Nadel fährt nach dem Einstechen automatisch in das Gehäuse ein, wodurch das Risiko versehentlicher Nadelstichverletzungen minimiert wird.

Kompaktes Design

Das einzigartige, patentierte Gehäuse umfasst eine Einführhilfe und eine Kanüle. Das vormontierte Cleo® 90 Infusions-Set erleichtert den Einstechvorgang und gibt Ihnen die Kontrolle über die Geschwindigkeit des Einstechens.

Sicher

Das Cleo® 90 Infusions-Set ist ein System mit eigener Nadelschutzvorrichtung. Nach dem Einführen der Kanüle fährt die Nadel automatisch in das Gehäuse ein, um das Risiko von Nadelstichverletzungen zu verringern.

Hypoallergener Verband

Der kleine, transparente Klebeverband ist luftdurchlässig, verhindert das Eindringen von Wasser und bleibt an Ort und Stelle – mit einem Minimum an Klebematerial. Der patentierte Freigabevorsprung erleichtert ebenfalls das Entfernen.

Flexible 360°-Verbindung

Die Schlauchverbindung kann um 360° gedreht werden, wodurch noch mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität entsteht. Die Flex Attach™ 360°-Einstichstellenverbindung ermöglicht die Rotation direkt an der Einstichstelle und bietet somit größere Flexibilität.



EIN UMFASSENDES SORTIMENT AN SUBKUTANEN INFUSIONS-SETS, AUSGERICHTET AUF DIE ANFORDERUNGEN DES JEWEILIGEN PATIENTEN

Cleo® 90 Infusions-Set – Katheter ohne Winklung

Produktreferenz	Kanülenlänge (mm)	Schlauchlänge
21-7220-24	6	24" (61 cm)
21-7221-24	6	31" (79 cm)
21-7222-24	6	42" (107 cm)
21-7230-24	9	24" (61 cm)
21-7231-24	9	31" (79 cm)
21-7232-24	9	42" (107 cm)

Steril, in 10er-Packungen

Verschiedene Größen
Verschiedene Nadel-
längen, 6 und 9 mm

Standardmäßige
Luer-Lock-
Verbindung



Kappe drehen zum Entfernen.



Kanüle einsetzen. Produkt fest andrücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist; anschließend 5 Sekunden lang gedrückt halten. Gerade abziehen.



Schlauchsatz verbinden.

DAS/DIE GENANNT(E)N PRODUKT(E) IST/SIND MÖGLICHERWEISE IN KANADA UND ANDEREN LÄNDERN NICHT LIZENZIERT BZW. ERHÄLTICH

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel.: 1-614-210-7300
Gebührenfrei in den USA: 1-800-258-5361

Kontaktinformationen zu Ihrer Region finden Sie unter: www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical ist Teil des weltweit operierenden Technologieunternehmens Smiths Group plc. Eine vollständige Liste der Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung/Bedienungsanleitung. Cleo, Flex Attach und die Bildmarke von Smiths Medical sind Marken von Smiths Medical. Das Symbol © bedeutet, dass die Marke beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt und in bestimmten anderen Ländern eingetragen ist. Alle anderen erwähnten Namen und Marken sind Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Inhaber. ©2019 Smiths Medical. Alle Rechte vorbehalten. IN193873DE-092019

MPAUC-1381

Rx ONLY **CE**
2797

smiths medical